



 **angelus<sup>®</sup> HOME**  
Japan アンジェラスホーム

医薬品含有歯科用歯面清掃補助材

**10% 16%**



2種類の濃度を有した、  
新しいホームホワイトニング材  
フッ化ナトリウム・硝酸カリウム 配合

## 主な10%と16%の違い

|                 | 過酸化尿素濃度 | 1日の使用時間 | 使用期間 |
|-----------------|---------|---------|------|
| アンジェラス ホーム(10%) | 10%     | 2時間     | 2週間  |
| アンジェラス ホーム(16%) | 16%     | 1時間30分  | 2週間  |

## シリンジの使用法



アプリケーターチップ先端部を折ります。  
※切り取ったパーツは、上下逆さまにする事でキャップになります。  
※折り方によって、アプリケーターチップ先端部が塞がってしまい、ジェルが出が悪くなる事があります。



キャップ突起部をアプリケーターチップ先端部に押し込むように挿入してください。



ジェルをマウストレーに充填してください。



キャップを装着し保管して下さい。  
※冷蔵保存をお勧めします。



増粘剤でジェルが流れにくい為、2時間の使用も快適です。



シリンジ内容量3.0gと経済的です。

※3.0gの内容量で最大3回分の使用が可能です。

※本品の使用前、使用後は冷蔵保存をお勧めします。

※製品には気泡が混入していることがありますが、品質等には問題ありません。

※6歯合計で1目盛り(0.5g)が目安です。

## 商品情報



アンジェラス ホーム10%  
販売名:アンジェラス ホーム  
高度管理医療機器  
医療機器承認番号:30100BZX00059000  
一般的名称:医薬品含有歯科用歯面清掃補助材  
内容量:1本/3.0g



アンジェラス ホーム16%  
販売名:アンジェラス ホーム16%  
高度管理医療機器  
医療機器承認番号:30400BZX00204000  
一般的名称:医薬品含有歯科用歯面清掃補助材  
内容量:1本/3.0g



マウストレーシート 5枚入  
販売名:アンジェラス ホーム マウストレー  
一般医療機器  
医療機器承認番号:27B1X00147000005  
一般的名称:歯科用咬合スプリント  
寸法:135mm×135mm×1.0mm

| 商品コード       | 製品名                       | 標準価格   |
|-------------|---------------------------|--------|
| ANHOME10ST  | アンジェラス ホーム(10%) スターターセット※ | 7,300  |
| ANHOME10/02 | アンジェラス ホーム(10%) 2本入り      | 3,400  |
| ANHOME10/06 | アンジェラス ホーム(10%) 6本入り      | 7,900  |
| ANHOME10/12 | アンジェラス ホーム(10%) 12本入り     | 14,000 |
| ANHOME16ST  | アンジェラス ホーム(16%) スターターセット※ | 8,300  |
| ANHOME16/02 | アンジェラス ホーム(16%) 2本入り      | 4,200  |
| ANHOME16/06 | アンジェラス ホーム(16%) 6本入り      | 8,300  |
| ANHOME16/12 | アンジェラス ホーム(16%) 12本入り     | 14,500 |
| ANHOMET5S   | アンジェラス ホーム マウストレー5枚入り     | 2,200  |

※スターターセット内容:シリンジ(4本)、マウストレー(2枚)、リーフレット(カラーチャート記録付)

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。価格は2024年9月現在消費税別です。

●お問い合わせは下記まで

●製造販売業:Angelus Japan 株式会社 大阪府茨木市下穂積4-13-206

詳しい説明は以下の  
サイトからご覧ください。

**angelus**  
Japan  
072-657-7756

