

## 1. 登録



新しいアカウントを作成する

<https://nea.helios.sifary.com/login> にアクセスします。  
『新しいアカウントを作成する』をクリックします。

## 2. 登録

日本

国 / 地域は提出した後に変更できませんので、慎重に選んでください

電話番号 / メールアドレスを入力してください

認証コードを入力してくだ...

認証コードを取得する

お名前を入力してください

パスワードを入力してください

もう一度パスワードを入力してください

内容を読み、同意したことを示す確認

[プライバシーポリシー](#) [利用規約](#)

登録

すでにアカウントをお持ちですか? [ログインする](#)

国を選択

電話番号 or メールアドレスを入力

『認証コード』をクリック

### 3. 登録

デンタルクラウドプラットフォーム

日本

国/地域は提出した後に変更できませんので、慎重に選んでください

電話番号 / メールアドレスを入力してください

認証コードを入力してくだ... **認証コードを取得する**

お名前を入力してください

パスワードを入力してください

もう一度パスワードを入力してください

内容を読み、同意したことを示す確認 プライバシーポリシー 利用規約

**登録**

すでにアカウントをお持ちですか? ログインする

メールに来たコードを入力

名前を入力

パスワードを入力

パスワードを再入力

チェック


『登録』をクリック

### 4. ログイン



ログイン画面に移るのでログインします。


## 5. 提携クリニックとのグループ作成

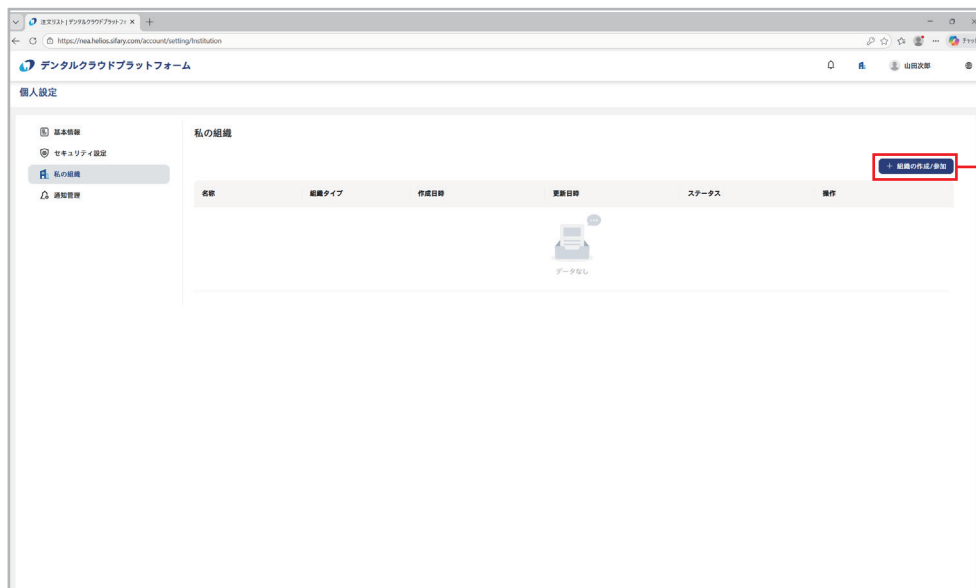

+ 組織の作成/参加

『Create/Join an oeganization』クリックします。

## 6. 提携クリニックとのグループ作成

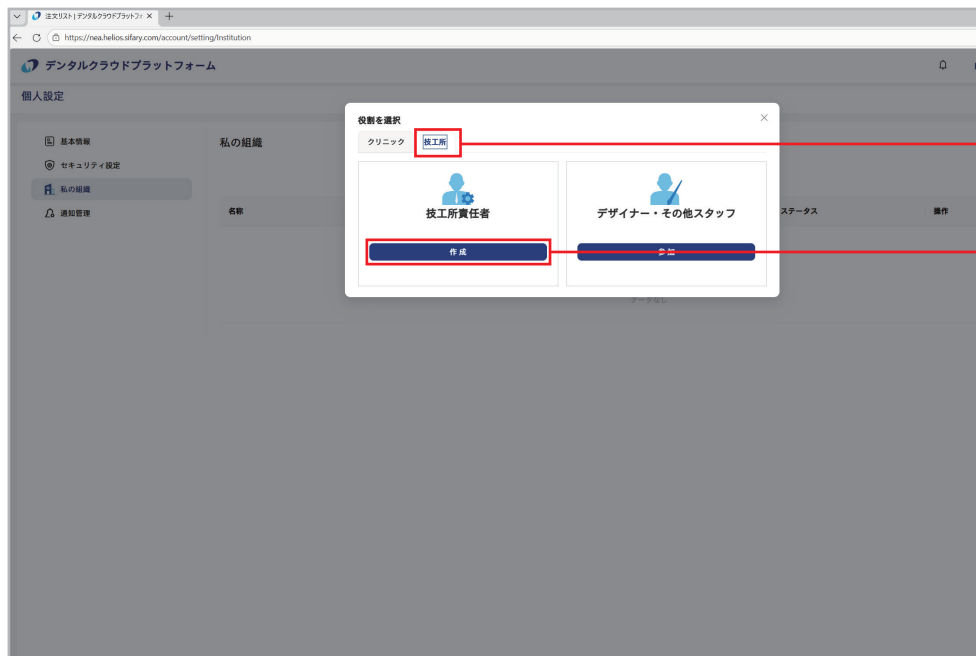

技工所

作成

『技工所』クリックし、『技工所責任者』の『作成』クリックします。

## 7. 提携クリニックとのグループ作成

技工所名入力

国を選択

『送信』クリック

## 8. 提携クリニックとのグループ作成

基本情報

『基本情報』クリック

## 9. 提携クリニックとのグループ作成

連絡先欄に電話番号入力


『送信』クリック

ここからはクリニックサイドとの連携→承認になります。

①はクリニックでの連携、②はラボでの承認になりますので、それぞれで行ってください。

### ① クリニックサイドで必要な連携作業

歯科技工所サイドの登録が終わりましたら、クリニックサイドでの連携作業を行います。  
クリニックアカウントをブラウザでログイン

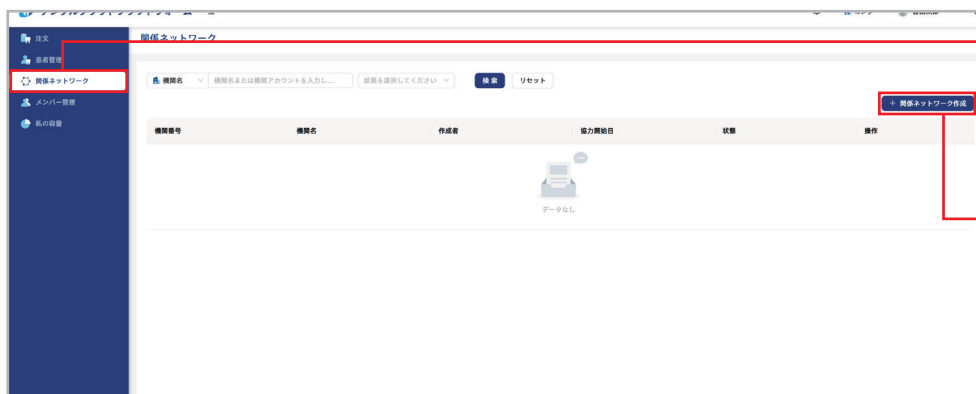


関係ネットワーク

『関係ネットワーク』  
をクリック

+ 関係ネットワーク作成

『関係ネットワーク作成』  
をクリック

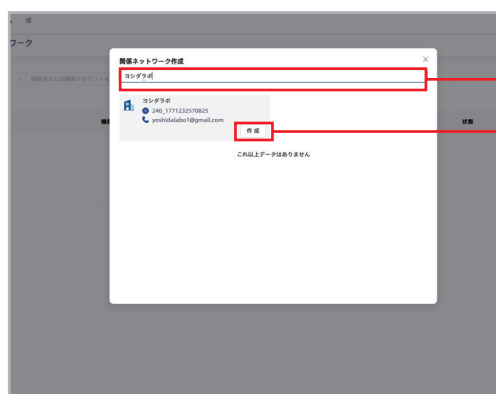

連携したい技工所名を検索

『作成』クリック

### ② ラボサイドでの承認作業



ラボサイドでログインすると、連携のリクエストが来てるので赤枠内の  
チェックボタンをクリックし承認すれば連携完了です。

## ラボでのデータの受け取り手順

クリニックからデータが送られてきたら下記手順でダウンロードしてください。




236\_1770967928650

①オーダーされたデータを確認し、『Order Number』クリック



確認

②『確認』クリック

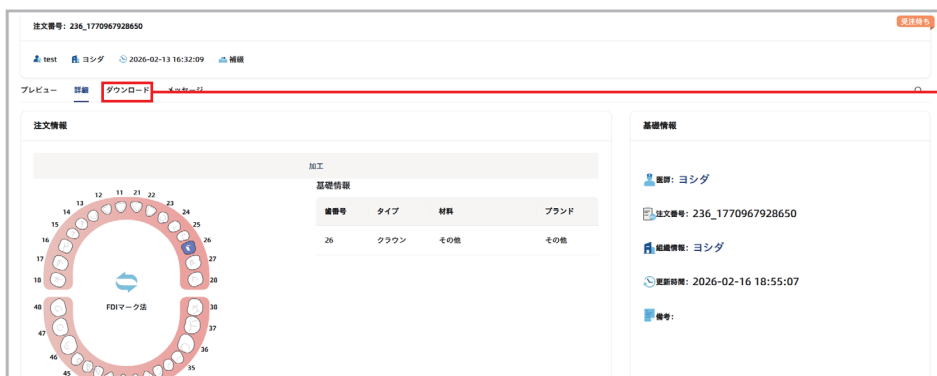

ダウンロード

③『ダウンロード』クリック



④赤枠のダウンロードボタンで必要なファイルをダウンロードします。