

1. アプリを起動




デスクトップより『Helios680 Center』を起動します。

2. 登録



『新規登録』をクリックします。


3. 登録

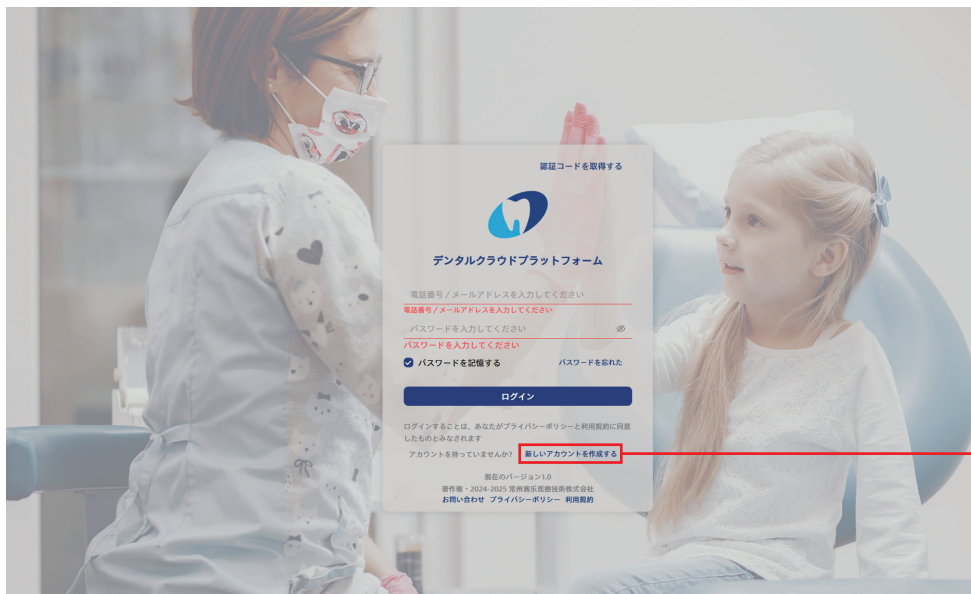

新しいアカウントを作成する

ブラウザが立ち上がります。
『新しいアカウントを作成する』をクリック。

4. 登録

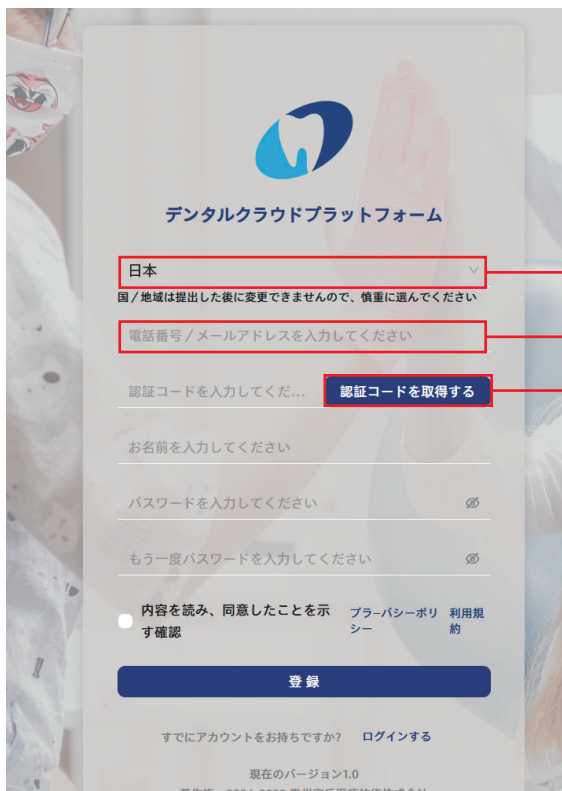

国を選択

電話番号 or メールアドレスを入力

『認証コードを取得する』をクリック

5. 登録

デンタルクラウドプラットフォーム

日本

国/地域は提出した後に変更できませんので、慎重に選んでください

yoshidacad@gmail.com

正しい国コードを選択してください。携帯番号には国コードを再入力する必要はありません。例: +1-123-456-7890の場合は1234567890と入力してください

209381

認証コードを取得する

吉田太郎

パスワードを入力

パスワードを再入力

内容を読み、同意したことを示す
プライバシーポリシー 利用規約

登録

すでにアカウントをお持ちですか? ログインする

現在のバージョン1.0
著作権 © 2024-2025 常州高乐医療技術株式会社
お問い合わせ プライバシーポリシー 利用規約

メールに来たコードを入力

名前を入力

パスワードを入力

パスワードを再入力

チェック

『登録』クリック

6. ログイン



ログイン画面に移るのでログインします。

7. グループ作成



+ 組織の作成/参加

『組織の作成/参加』をクリックします。



『クリニック責任者』の『作成』をクリックします。



歯科医院名入力

国を選択

電話番号を入力

住所を入力

『送信』クリック

9. 再ログイン



ブラウザを終了しもう一度ソフトを開いてログインします。



『プライバシーポリシー』『利用規約』をご確認いただき『同意して次へ進む』にチェック、『確認』をクリックします。



インストール完了です。

ここからはクリニックサイドとの連携→承認になります。

①はクリニックでの連携、②はラボでの承認になりますので、それぞれで行ってください。

① クリニックサイドで必要な連携作業

歯科技工所サイドの登録が終わりましたら、クリニックサイドでの連携作業を行います。
クリニックアカウントをブラウザでログインします。




関係ネットワーク

『関連ネットワーク』
をクリック

+ 関係ネットワーク作成

『関連ネットワーク作成』
をクリック

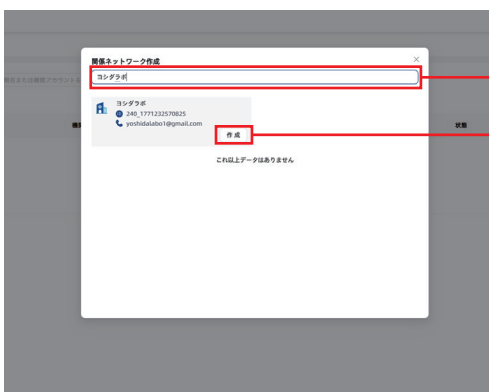

連携したい技工所名を検索


『作成』クリック

② ラボサイドでの承認作業



ラボサイドでログインすると、連携のリクエストが来てるので赤枠内の
チェックボタンをクリックし承認すれば連携完了です。

1. データの保存

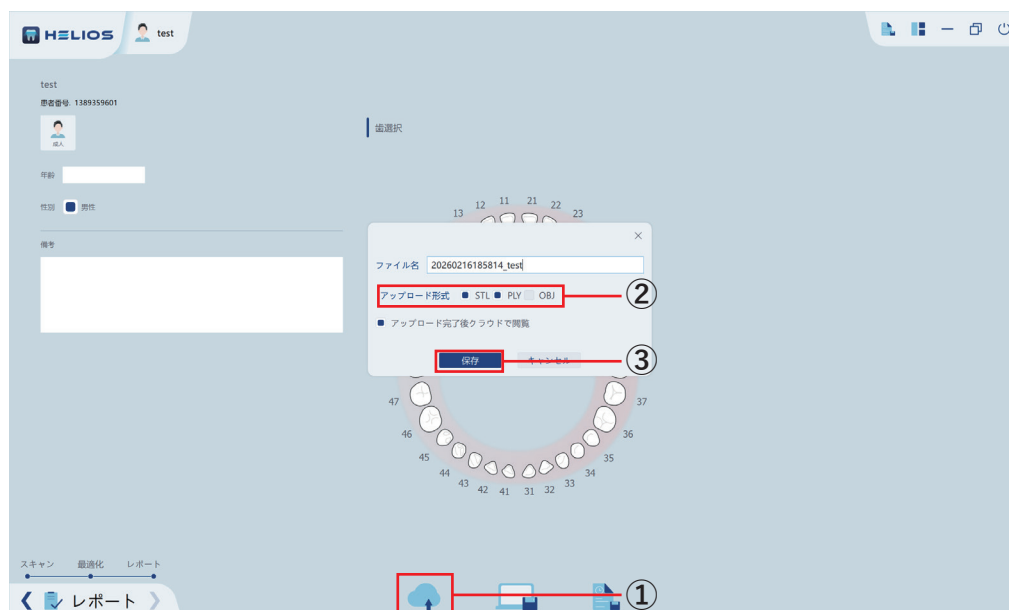

スキャンが完了したレポートの画面

①クラウドを選択 → ②アップロード形式を選択 → ③保存

2. 送信準備



アップロードが完了すると自動でブラウザが立ち上がります。
赤枠ボタンをクリックします。

3. 送信する技工所選択

注文送信

注文情報

患者: test 医師: ヨシダ 目録工: ヨシダラボ ①

病状タイプ: 虫歯 インプラント

注文タイプ: 加工 デザイン

保存 ②

注文

加工

番号	タイプ	材料	ブランド
26	クラウン	その他	その他

①のドロップダウンメニューより、送りたい技工所を選択し、
②の『保存』をクリックします。

4. 送信

注文送信

注文情報

ヨシダ test ヨシダラボ 2026-02-13 16:32:09

注文

加工

番号	タイプ	材料	ブランド
26	クラウン	その他	その他

赤枠の『送信』をクリックすると送信が完了します。