

SPECIFICATIONS



E-FLOW

Dental anesthesia delivery system

販売名：プレシジョン E-Flow

医療機器分類：管理医療機器 特定保守管理医療機器

認証番号：307AGBZX00028000

標準価格：248,000円(税抜)

一般的名称：歯科麻酔用電動注射筒

リチウムイオン電池：DC11.1V, 2600mAh, ± 10%

ACアダプター電源：AC100-240V, ± 10%

周波数：50/60 Hz, ± 1Hz

出力：DC20V/0.9A

寸法(メインユニット)：W132.2mm×D108.2mm×H108mm

寸法(ハンドピース)：W18mm×D101.3mm

重さ：1.8Kg ± 10%

※ 仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。価格は2026年6月現在のものです。

● お問い合わせは下記まで

● 製造販売業：Angelus Japan 株式会社 大阪府茨木市下穂積4-13

 angelus[®]
Japan
072-657-7756

E-FLOW

Dental anesthesia delivery system



コンピューター制御×フットペダル
『痛みに配慮』した麻酔システム


 angelus[®]
Japan

E-FLOW

Dental anesthesia delivery system


Hydraulic Drive Technology

見やすいシンプルなディスプレイ
スピードや投与量を制御

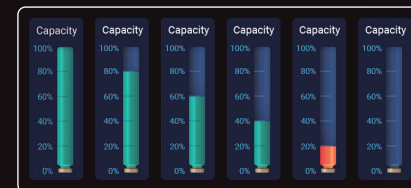


見やすい液体表示

リアルタイムで残量を確認できます。

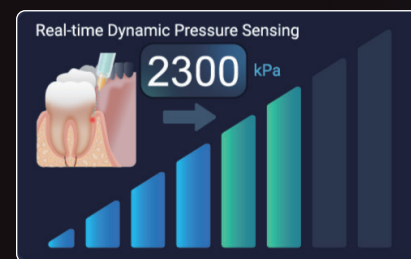


注入圧力のリアルタイム表示

グラフに基づいて注入圧力を調整することで、痛みの少ない治療を実現できます。

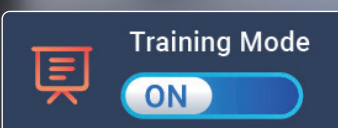

トレーニングモード

ユーザーが適切な操作を習得できるよう音声でサポートします。

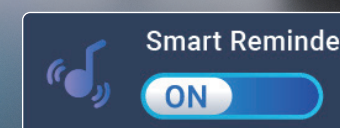

スマート音声リマインダー

麻酔カートリッジ残量の通知、注入圧力が高すぎる場合、音声お知らせします。

Painless Treatment

4つのモード

NORMAL

0.3ml/分
0.6ml/分

FAST

0.6ml/分
1.2ml/分

PDL

0.3ml/分

DOSAGE

0.3ml/分
0.6ml/分

警告: クリップを設定できません。GDI ステータス



PDL(歯根膜)モード

注入速度を調整し、不快感を軽減します。



DOSAGE(投与量制御)モード

投与量を設定し、制御することができます。

HANDPIECE

オートクレーブ対応

自動吸引機能

軽量で小型のハンドピース

フットペダル制御

フットペダルにより、速度切替が可能。
注入速度を調整できます。

